

試料	検査への対応				必要量	採取・送付の条件	推奨する採取・送付器具	備考
	SNP検査	親子判定	特定遺伝子	フリーマーチン				
尾房部毛根	✓	✓	✓		80本程度	汚れていない、質の良い毛根が確認されたもの、常温	【当団提供】 ビニール袋	
尾根部毛根		✓	✓		30本程度	汚れていない、質の良い毛根が確認されたもの、常温	【当団提供】 毛根台紙	
鼻汁	✓	✓	✓		綿球部分に十分浸み込む量	「鼻汁の採取方法」による、常温	【当団提供】 鼻汁採取キット	キメラの場合は毛根の送付をお願いします
血液	✓	✓	✓	✓	5.0ml程度	新鮮な全血、冷蔵が望ましい、血清は不可	【当団提供】 採血管 (EDTA入り) ヘパリン入りは不可	キメラの場合は毛根の送付をお願いします
精液		✓	✓		0.25ml程度	希釈精液、生精液等、冷蔵が望ましい	人工授精用 ストロー	